



ГЕМСТАНДАРТ
ПРОИЗВОДСТВО РЕАГЕНТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Гематоксилин Карацци

«ГЕМСТАНДАРТ-ГМК»

Краситель Гемстандарт - ГМК в растворе, далее по тексту - краситель, предназначен для применения в качестве красителя в цитологической и гематологической практике.

Состав:

Краситель представляет собой раствор сухого красителя гематоксилина — 1 фл. (250 мл).

Оборудование:

- секундомер
- микроскоп
- цилиндры мерные вместимостью 25 - 1000 мл
- стекла предметные
- бумага фильтровальная
- перчатки резиновые

Проведение определения:

Гематоксилин Карацци дает элективное окрашивание ядер, не закрашивает цитоплазму клеток и обычно не перекрашивает цитоплазму клеток и обычно не перекрашивает препараты и может использоваться как основной краситель в основных методах окрашивания цитологических препаратов, а также в цитохимических методиках для окраски ядер.

Меры предосторожности:

Меры предосторожности — соблюдение «Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР», Москва, 1981 г.

При работе с красителем следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, так как образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита В или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

Химическая посуда и оборудование, используемые при работе с красителем, должны быть соответствующим образом маркированы и храниться отдельно. Запрещаются хранение и приём пищи и курение в помещениях, предназначенных для работы с красителем.

Условия хранения и эксплуатации:

Хранение красителя должно проводиться при температуре от 0 до +25°C в закрытых вентилируемых помещениях вдали от кислот и щелочей, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, в течение всего срока годности (1 год).

Краситель стабилен после вскрытия флакона в течение всего срока годности при условии достаточной герметизации флакона.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению красителя.

**По вопросам качества гематоксилина Карацци «ГЕМСТАНДАРТ-ГМК»,
следует обращаться в ООО «ГЕМСТАНДАРТ» по адресу: 196641, г. Санкт-
Петербург, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», дорога на
Металластрой д.5 лит.А.**

Тел. (812) 46-46-144, e-mail: gemstandart@mail.ru